


Uusi kätevä laitteisto hapen annosteluun sarjoittaisen päänsäryn kohtaushoidossa

LIV® 15 kevytpullo ja maskilla varustettu Demand-venttiili

- säästää happea ja lisää turvallisuutta
- annostelee 100-prosenttista happea sisäänhengitettäessä
- vaivaton käyttää



Vasteaika (rapidity of relief) 39:llä potilaalla, jotka käyttivät menestyksellisesti 360:een sarjoittaisen päänsäryn kohtaushoittoon 7 litraa happea/min¹⁾

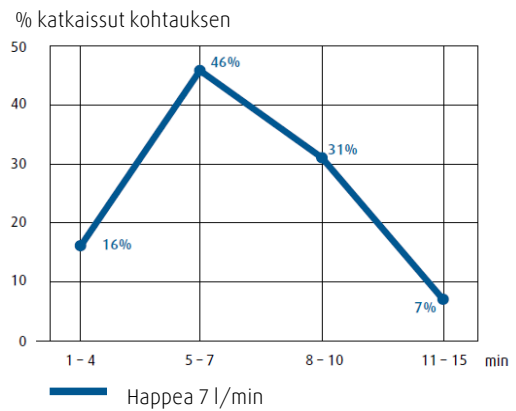

¹⁾Kudrow L.
Response of cluster headache attacks to oxygen inhalation.
Headache. 1981 Jan;21 (1):1-4.

Lisätietoja Linde Healthcaren asiakaspalvelusta puh. 0800 90008.

Oy AGA Ab
Linde Healthcare
Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo
Puh. 0800 90008
www.linde-healthcare.fi

100-prosenttista happea sisäänhengityksessä

Demand-venttiili sarjoittaisen päänsäryn happihoitoon on kaasunsäästin, joka annostelee 100-prosenttista happea sisäänhengityksessä. Laitteen käyttö ei edellytä virtaussäädintä. Sulkuventtiili varmistaa, että uloshengitysilma poistuu, eikä päädy takaisin järjestelmään. Näin 100-prosenttista happea voidaan hengittää vapaalla virtauksella, eikä sen joukkoon sekoitu huoneilmaa, jonka happipitoisuus on suhteellisen alhainen (noin 21 %).

Pidentää laitteiston käyttöikää

Demand-venttiili vähentää hapenkulutusta, koska potilas saa happea vain sisäänhengityksen kautta. Siten Demand-venttiili pidentää käytössä olevan laitteiston käyttöikää.

Maski

Demand-venttiilin kanssa käytettävä aikuisten maski istuu tiiviisti suun ja nenän ympärille, eikä sen sisään pääse ulkopuolelta ilmaa käytön aikana.

Lisää käyttöturvallisuutta

Demand-venttiili annostelee kaasua vain sisäänhengityksessä, joten kaasua ei pääse vuotamaan, kun laitteistoa ei käytetä.

Laitteiston käyttö ja huolto

Suosittellemme vaihtamaan uloshengitysventtiilin 30 päivän käytön jälkeen. Maski vaihdetaan tarpeen mukaan. Tuotteen täydellinen kuvaus on käyttöohjeessa.