

Valmistelut ja käyttöohjeet

Varoitus:

- Tämä pikaopas ei korvaa käyttöohjetta.
- Kaikki käyttöohjeessa kuvatut toimenpiteet on suoritettava ennen käyttöä ja hoidon aikana.
- Lue ennen käyttöä kaikki käyttöohjeessa mainitut varoitukset.

1. Kiskoliitäntä

Käytä sekoitinta vain, kun se on pystysuorassa asennossa ja kiskoon kiinnitettyinä.


2. Syöttöletkut

Kytke kaasun syöttöletkut (värikoodatut) syöttöliitäntään. Vihreä ilmaisin osoittaa hapen ja ilokaasun riittävän syöttöpaineen.




3. Kaasunpoiston tarkistaminen


- Kiinnitä puskuriletku.
- Varo pölyn imeytymistä.
- Suodatin ei saa olla likainen.
- Tarkista kaasunpoisto: kaasunpoiston ilmaisimen on oltava vihreä.

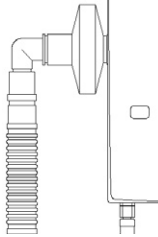

4. Hengityspussi


Aseta hengityspussi liittimen juureen asti.

-  Käytä ainoastaan laitekohtaista 3 litran lateksitonta hengityspussia.

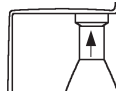

5. Uloshengitysventtiili

- Irrota uloshengityslitiin avaintyökälulla.
- Tarkista, että kalvo on tasaisesti venttiiliin istukan päällä.
- Tarkista kalvon sopivuus keskikohdassa.

-  Vaihda uuteen, jos kalvossa on reikiä tai ripsuja.

6. Ilokaasun syötön katkaisun testaaminen

- Kytke ainoastaan ilokaasu (vain N₂O-ilmaisim muuttuu vihreäksi).
- Kytke sekoitin päälle.
- Hengityspussi ei saa alkaa täyttyä.

-  Älä käytä sekoitinta, jos hengityspussi täyttyy, vaikkei hapetta ole kytketty.


7. Hengitykseen perustuvan annostelun testaaminen


- Kytke happi ja ilokaasu (ilmaisimet muuttuvat vihreiksi)
- Kytke sekoitin päälle.
- Hengityspussi alkaa täyttyä, ja kun se on täynnä, annostelu keskeytyy.

-  Älä käytä sekoitinta, jos hengityspussi ei täyty tai annostelu ei keskeydy.

8. Hengitysletkun tarkistaminen

- Liitä painemittari (0-50 mbar) tiiviiseen hengitysletkuun.
- Vedä hengityspussista, kunnes turvaventtiili alkaa toimia (jatkuva paine).
- Odota, kunnes painemittarin lukema on 10 mbar.
- Odota 30 sekuntia. Paineenlaskun on oltava alle 5 mbaria.

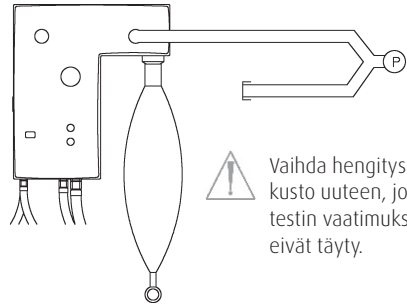

-  Vaihda hengitysletku uuteen, jos testin vaatimukset eivät täyty.

9. Toiminnan tarkkailu

- Hengityspussin on täytyttävä ja tyhjennettävä käytön aikana.
- Sisäänhengityksen aikana kuuluva äänimerkki osoittaa, että annostus ei ole riittävä.
- Tarkkaile syötön ilmaisimia.
- Tarkkaile kaasunpoiston ilmaisinta.
- Tarkkaile hengitykseen perustuvaa annostelua.

-  Tutustu vianmäärittysohjeisiin, jos toiminta poikkeaa normaalista.

Vianmäärittäsohjeet



Varoitus:

Jos hoidon aikana ilmenee ongelmia, joita ei voida ratkaista, VENTYO -sekoitin on kytkettävä irti potilaasta (ottamalla hengitysmaski pois).

Ongelma/hälytys	Mahdollinen syy	Suosittelavat toimenpiteet
Hengityspussi ei täyty/laite hälyttää alhaisesta kaasuvirtauksesta	<ul style="list-style-type: none"> Kaasunsyöttöä ei ole kytketty/kaasunsyöttö ei ole riittävä Hengityspussissa on vikaa Virheellinen annostelu 	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista kaasunsyöttö (vihreä ilmainen), kytke kaasunsyöttö Vaihda uusi hengityspussi Ota yhteys tekniseen tukeen
Annostelu ei keskeydy automaattisesti	<ul style="list-style-type: none"> Hengityspussia ei ole kytketty oikein Annostelumekanismissa on vikaa Hengityspussi ei ole laitteelle suunniteltu Hengityspussissa on vikaa Hengitykseen perustuva venttiili ei ole kireällä 	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista hengityspussin liitäntä Ota yhteys tekniseen tukeen Tarkista hengityspussin malli Vaihda uusi hengityspussi Ota yhteys tekniseen tukeen
Kaasunpoiston ilmaisin ei muutu vihreäksi	<ul style="list-style-type: none"> Ilmansyöttöä ei ole kytketty/ilmansyöttö ei ole riittävä UTL-/ulohengityslakku on tukossa Kaasunpoistojärjestelmää ei ole säädetty oikein Kaasunpoistojärjestelmässä on vikaa Sairaalan alipainejärjestelmä ei ole vaatimusten mukainen 	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista ilmansyöttö Tarkista lakku Ota yhteys tekniseen tukeen Ota yhteys tekniseen tukeen Säädä alipainejärjestelmää, käytä VENTYO-sekoitinta, jossa on sisäinen kaasunpoistojärjestelmä – ota yhteys tekniseen tukeen
Alhaisen kaasuvirtauksen hälytystä ei voi aktivoida	<ul style="list-style-type: none"> Uloshengitysventtiiliä ei ole asennettu/ulohengitysventtiilissä on vikaa Hälyääni ei toimi 	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista kiinteä ulohengitysventtiili Ota yhteys tekniseen tukeen
Potilas ei hengitä sisään hengityspussin kautta (hengityspussi ei täyty ja tyhjene)	<ul style="list-style-type: none"> Kiinteää ulohengitysventtiiliä ei ole asennettu/ulohengitysventtiilissä on vikaa 	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista kiinteä ulohengitysventtiili

Myyjä Suomessa:

Oy AGA Ab

Linde Gas Therapeutics

Itsehallintokuja 6 | 02600 Espoo

Puh. 0800 90016 | Faksi 010 242 0593